

Návod na použitie zdravotníckej pomôcky

IALUNA®

Čapíky IALUNA® obsahujú sodnú soľ kyseliny hyalurónovej, ktorá napomáha hydratácii sliznice pošvy tým, že je schopná zadržiavať vodu. Vďaka špeciálnym vlastnostiam pomáhajú čapíky IALUNA® udržiavať fyziologickú úroveň hydratácie tkanív, normalizujú prostredie v pošve a napomáhajú lubrikácii, potrebnej k odstráneniu všetkých patofyziologických javov spájaných so suchosťou pošvy.

Indikácie

Napomáha v liečbe neagresívnych stavov pošvy, ako sú podráždenie, svrbenie a nekomplikovaná atrofická vaginitída.

Atrofická vaginitída, spôsobená chemoterapiou.

Tiež pomáha pri obnovení prirodzených fyziologických vnútropošvových podmienok po pôrode a gynekologickej operácii.

Zloženie

Každý 2 g čapík obsahuje:

Sodná soľ kyseliny hyalurónovej; v tukoch rozpustný extrakt z *Centella Asiatica*; v tukoch rozpustný extrakt z *Chamomilla vulgaris*; D,L-alfa tokoferylacetát; koloidný oxid kremičitý bezvodý; tuhé polosyntetické glyceridy.

Popis zdravotníckej pomôcky

Každá škatuľka obsahuje 2 blisterové balenia po 5 čapíkov.

Spôsob použitia

Pred otvorením škatuľky si dôkladne umyte ruky.

Z blisterového balenia vyberte jeden čapík, pričom sa snažte nepoškodiť lôžka zostávajúcich čapíkov.

Jemne si zaveďte čapík do pošvy, snažiac sa zasunúť ho hlboko do pošvy pomocou prstu, aby ste predišli náhodnému priesaku.

Frekvencia používania

Pokiaľ váš lekár nestanoví inak, odporúča sa zavádzať do pošvy 1 čapík raz denne. Odporúča sa, aby ste si zaviedli čapík večer pred spaním, aby sa zaistil najlepší účinok pomôcky.

Nepoužívajte čapíky IALUNA® dlhodobo. Ak príznaky podráždenia pretrvávajú, obráťte sa na svojho lekára.

Bezpečnostné opatrenia a upozornenia

Čapíky IALUNA® sú iba na vaginálne použitie.

Pred použitím čapíkov IALUNA® sa svojho lekára opýtajte, či netrpíte na atopickú alergiu.

Nevystavujte teplotám prevyšujúcim 25 °C.

Nepoužívajte čapíky IALUNA® po dátume expirácie, ktorý je uvedený na etikete.

Nepoužívajte čapíky IALUNA®, ak je obal otvorený alebo poškodený.

Po použití zlikvidujte zdravotnícku pomôcku v súlade s požiadavkami na bežný separovaný odpad.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ

Tehotenstvo

Nepoužívajte počas tehotenstva, pokiaľ vám to nenariadi lekár.

Kontraindikácie

V súčasnosti nie sú známe žiadne kontraindikácie pre použitie čapíkov **IALUNA**[®].

Nepoužívajte v prípade známej precitlivenosti na niektorú zložku.

Nepoužívajte pri alergii na *Compositae* (rastlinná čeľaď *Asteraceae*).

Vedľajšie účinky

Používanie čapíkov **IALUNA**[®] nemá žiadne vedľajšie účinky.

Ak pri používaní tejto pomôcky spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.

Čas použiteľnosti: 36 mesiacov

Dátum expirácie označuje maximálny čas použiteľnosti zdravotníckej pomôcky.

DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE PÍ SOMNEJ INFORMÁCIE: December 2019

Rok CE certifikácie: 2010

Výrobca:

IBSA FARMACEUTICI ITALIA srl

Via Martiri di Cefalonia 2

26900 Lodi (LO), Taliansko

info@ibsa.it

Zastúpenie pre SR:

IBSA Slovakia s.r.o.

Mýtna 42


811 07 Bratislava, Slovenská republika



Na jednorazové použitie



Pozor: pozorne si
prečítajte upozornenia

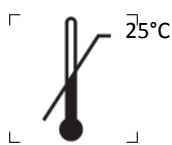

Horný teplotný limit




Šarža



Použite do



Nepoužívajte, ak je obal poškodený

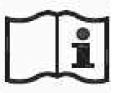

Prečítajte si návod na použitie